


一次性使用

包皮切割吻合器

Disposable Circumcision Stapler

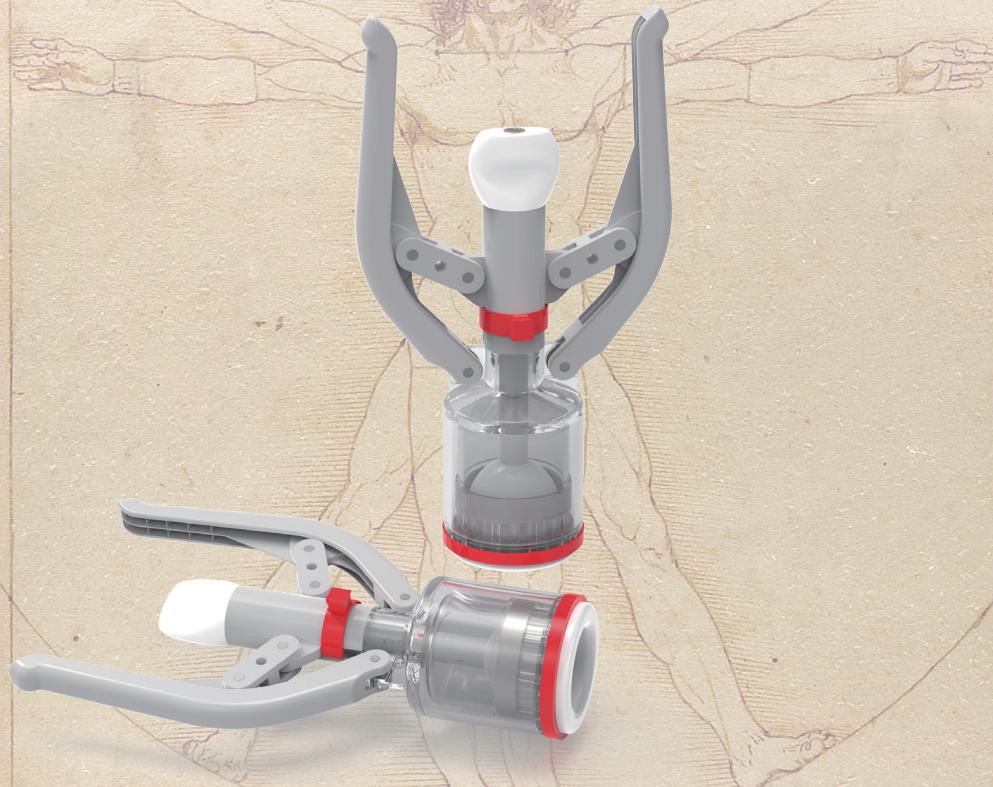

一次性使用包皮切割吻合器

生产企业名称：威海美迪森医疗器械股份有限公司

售后服务单位：威海美迪森医疗器械股份有限公司

生产地址：威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园

医疗器械注册证编号：鲁械注准20192020192



产品名称

一次性使用包皮切割吻合器

型号规格

MDCS-A-12、MDCS-A-16、MDCS-A-22、MDCS-A-26、MDCS-A-30、
MDCS-A-36

产品特点

- 减少痛苦、切口边缘平整、恢复快；
- 节约了缝合、止血等时间；
- 由于术中无缝线结扎，避免了结扎止血后线头残留引起的异物不适感。



与常规包皮环切手术对比优势：

- 包皮切缘整齐对称，外形更美观；
- 患者术后舒适度明显提高；
- 常规手术中，医生很容易伤到自己，造成伤口感染，包皮切割吻合器可以最大限度地预防意外的发生。

适用人群、范围及科室：

适用人群：使用不受年龄限制，儿童、成人的包皮过长或包茎，均可采用。

适用范围：临床包皮切割缝合手术。


预期使用科室：泌尿外科常用手术室。

禁忌症：

包皮及龟头畸形者（包括包皮龟头广泛紧密粘连者；包皮及龟头感染、水肿者；疑有阴茎癌者；患有系统性疾病（如出血倾向、低蛋白血症、严重心血管疾病等）禁忌手术。

使用方法


01

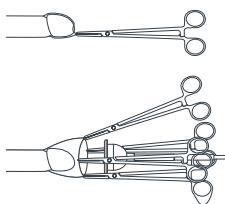

用止血钳在内外板移行处夹住包皮腹侧（系带处）。

再分别用两到四把止血钳夹其部位，以便提起包皮。


02

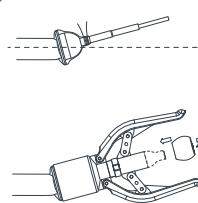

用扎带或丝线将包皮固定在移动器上。

将器械套上，旋上并收紧定位调节螺母至拉杆尾端面，移动器与螺母后面相平或稍微突出。


03

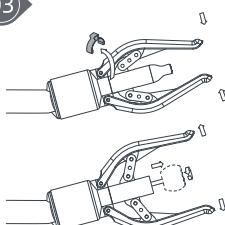

取出保险扣，按下手柄，包皮被切割并同时缝合。

30秒钟后松开手把，当手把不会自行松开时可用手辅助松开，调节螺母时以5-10mm时旋转。

04

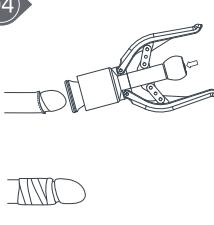

移动器向前顶，使切割部位松开，观察是否完全切断，如有未切断，可用刀片或剪刀修剪。

切割完后可直接用弹力绷带进行加压包扎，30分钟后松开弹力绷带，在无血管处剪开硅胶圈。