

 一次性使用

无菌包皮环切器

DISPOSABLE STERILE CIRCUMCISION DEVICE

手术简便易行，安全无痛苦。

手术时间3~5分钟，不开刀、免缝合。

术后恢复迅速不影响学习和生活。



全新设计 新型材料

生产企业名称：威海美迪森医疗器械股份有限公司

生产许可证编号：鲁药监械生产许20130088号

生产地址：威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园

医疗器械注册证编号：鲁械注准 20222021157

专利号：ZL 2020 2 1078789.X



产品信息

【产品名称】一次性使用无菌包皮环切器

【规格】MDS-HQQ01、MDS-HQQ02

【型号】9、11、13、15、17、19

【结构组成】由套茎环、手柄、松紧绳组成。

【适用范围】适用于环切阴茎包皮。

【适用科室】泌尿外科、外科、儿科。



产品特点



传统手术：手术时间长，出血量多，恢复慢，创口大不规则，需缝合不美观。

激光手术：虽然有良好的止血作用，但仍需要对重要血管进行结扎，恢复慢。

美迪森产品：过长的包皮轻松脱落、恢复快、术后无疤痕、愈合后光滑美观。



手术简便易行，安全无痛苦。手术时间3-5分钟，不开刀、免缝合、恢复迅速不影响学习和生活。



包皮环切后可降低成年后HIV的感染几率达60%以上，对预防HIV的传播起了一定的作用。先进的技术、突出的优势，使各年龄段的男性朋友的难言之隐都可一“切”了之。



用“包皮环切器”促使阴茎在夜间频频勃起，不断膨胀。激活阴茎细胞组织，形成二次发育。




包皮环切后引起龟头表皮角质化而起到脱敏作用，增强性功能。



可预防婴幼儿尿路感染以及成年男性尿道炎、龟头炎症的癌变；同时可避免交叉感染，预防妇科疾病。

使用方法

术前事项：术前对手术部位及周围进行消毒处理；以表皮注射方式进行麻醉。

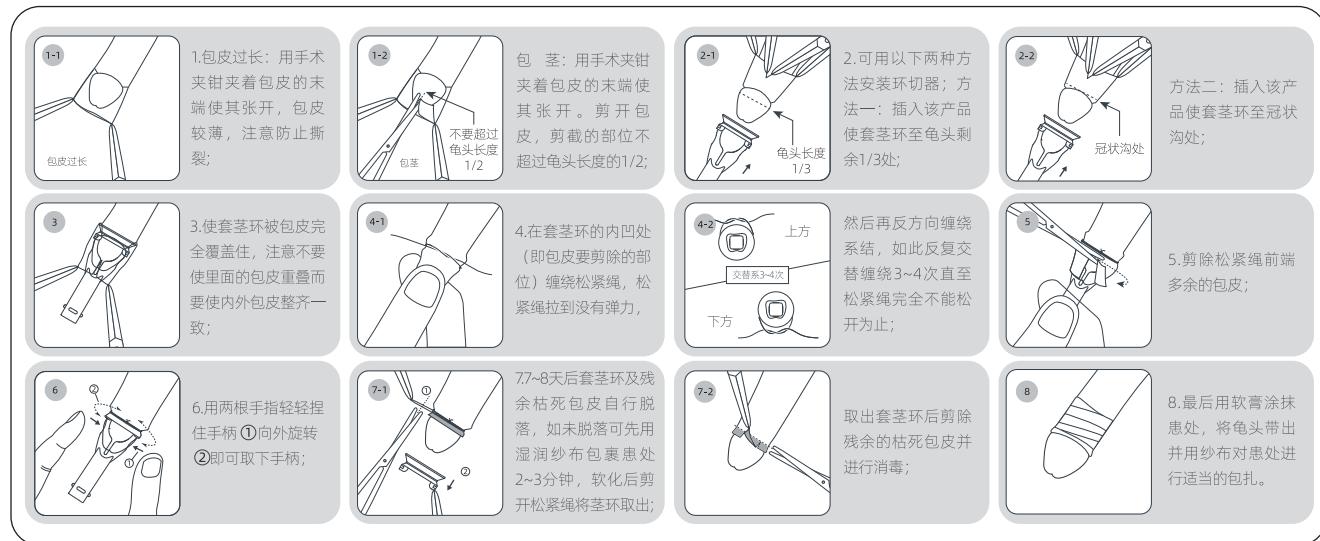

禁忌症

急性尿路感染、手术部位急性炎症（如包皮及龟头感染等）、水肿期患者禁用；隐匿性阴茎禁用；患有系统性疾病（如出血倾向、低蛋白血症、严重心血管疾病等）及精神疾病等禁忌手术者禁用；糖尿病患者在血糖未控制至正常范围之前禁用；阴茎癌患者禁用；近期使用过有抗凝血功能药物者禁用；对产品使用的原材料过敏者禁用。