

液体创可贴

LIQUID BANDAGE
液体伤口敷料

如肌肤般柔软有弹性!!!



青松郁合

液体伤口敷料

生产企业名称：威海美迪森医疗器械股份有限公司
售后服务单位：威海美迪森医疗器械股份有限公司

生产地址：威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园
医疗器械备案编号：鲁威械备20180123号



产品名称 液体伤口敷料 (Liquid wound dressing)

型号规格 1.5g、8g

医疗器械备案编号 鲁械注准20180123号

产品简介 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，防止外界细菌、病毒侵入伤口，为皮肤组织愈合创造良好环境。

适用范围 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。

销售范围 线上、线下连锁，可贴牌。

禁忌症 对非小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的伤口禁止使用。



8g

1.5g

使用说明：

产品涂抹于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤后，在体温作用下快速成膜。

注意事项：

- 仅限于外用。
- 对非小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的伤口禁止使用。
- 避免直接接触眼睛，分泌黏液膜。
- 勿与外用抗生素或其他皮肤外用药在同一部位使用。
- 如发现包装破损，禁止使用。
- 过期产品禁止使用。


贮存方法：

- 本产品应储存在阴凉干燥、通风良好、清洁的环境中。
- 本产品运输过程中要谨防挤压、阳光直射和雪雨浸淋。

使用说明图示 8g

※使用本品前，请清理创口，创口及周围部位请消毒处理。


※使用后拧紧外盖，保持密封，在室温处保存。

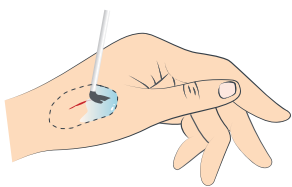


- ① 涂抹范围
涂抹产品覆盖伤口及周围，5~10分钟，在体温作用下快速成膜，期间请勿碰触。



- ② 涂抹厚度
成膜后，较薄的部位可直接在其上，重新涂抹一层。

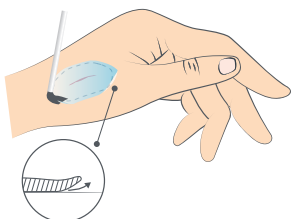

- ③ 一天后
因碰触或冲洗导致膜的边缘翘起，可在膜的边缘重新涂抹。

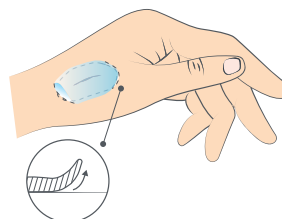

- ④ 2~3天后
如伤口没有愈合，膜已有大面积翘起，可整张撕掉重新涂抹一层。